


TEST AUTODIAGNÓSTICO DE ANTÍGENOS Covid-19




RESULTADOS EN 15 MINUTOS



99,20%
ESPECIFICIDAD

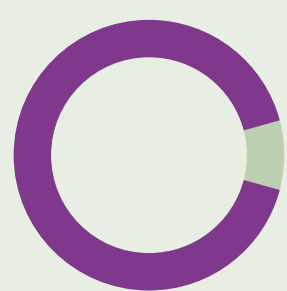

96,77%
SENSIBILIDAD

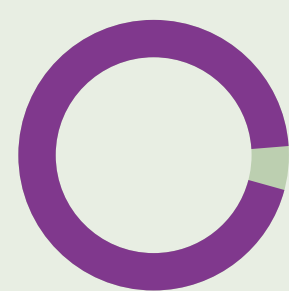


98,72%
PRECISIÓN

INSTRUCCIONES DE USO



PASO 1

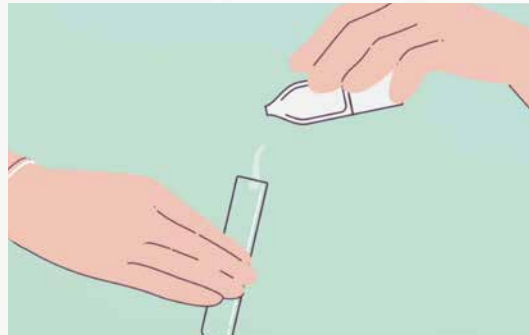

Tras sonarte bien la nariz, abre el vial que contiene el líquido reactivo y vacíalo en el tubo de extracción. Abre también el envase del bastoncillo y sácalo sin tocar la punta blanda.

PASO 2



Introduce la punta blanda del bastoncillo 2,5 cm y gíralo 3 o 4 veces a lo largo de la mucosa de la fosa nasal. Repite este mismo proceso en la otra fosa nasal.

PASO 3



Coloca el bastoncillo en el tubo de extracción que contiene ahora el líquido reactivo y gíralo en su interior de 3 a 5 veces. Después, deja el bastoncillo en el tubo de extracción durante un minuto.

PASO 4




Retira el bastoncillo del tubo de extracción con cuidado. Coloca el tapón en el tubo y ciérralo firmemente.

PASO 5



Con el cassette apoyado en una superficie plana, deposita exactamente 3 gotas en el hueco marcado con una "S".


PASO 6

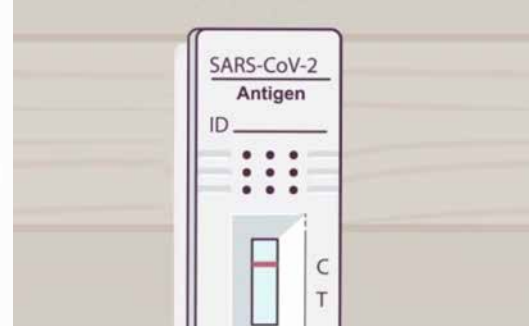


Después de 15 minutos, podrás leer el resultado. No esperes más de 20 minutos, ya que después el resultado podría no ser fiable.

¿CÓMO DEBO INTERPRETAR EL RESULTADO?


✓ POSITIVO

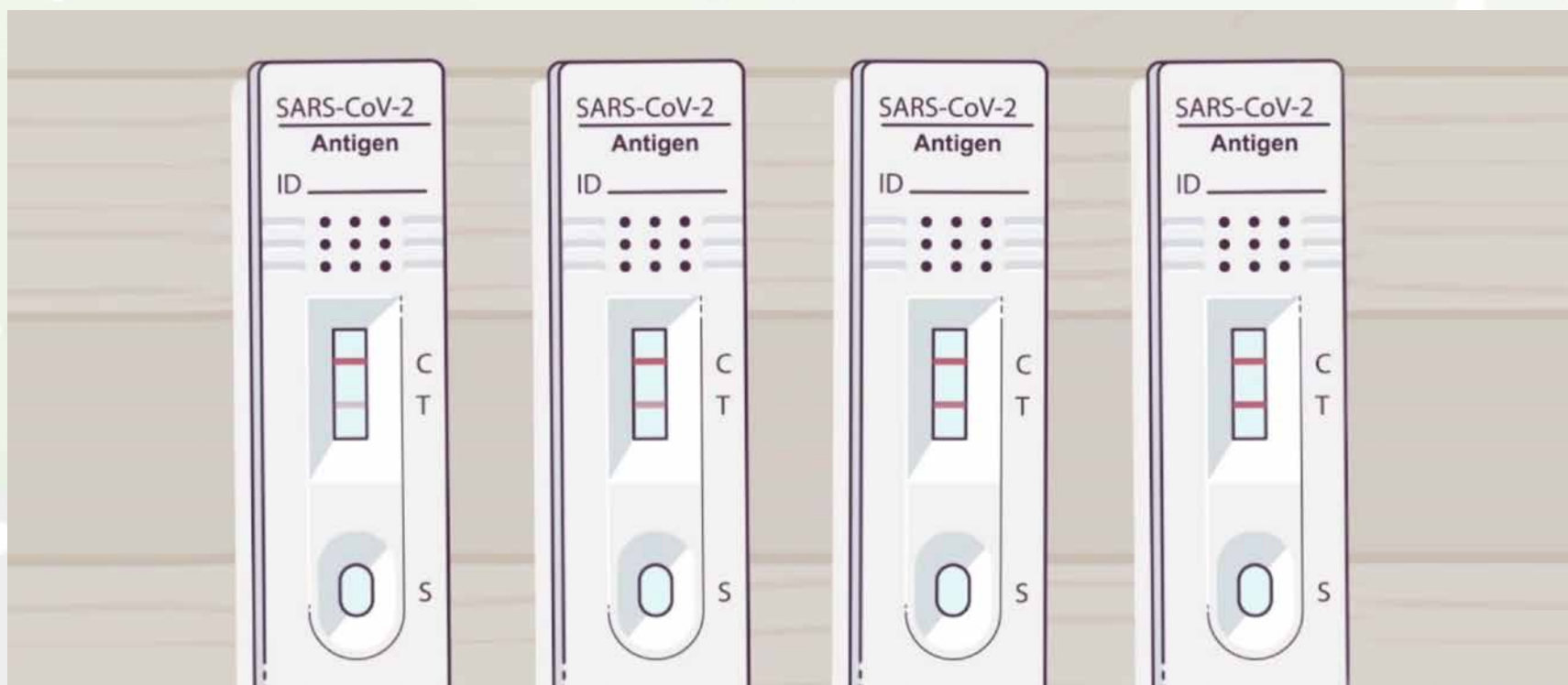

✗ NEGATIVO

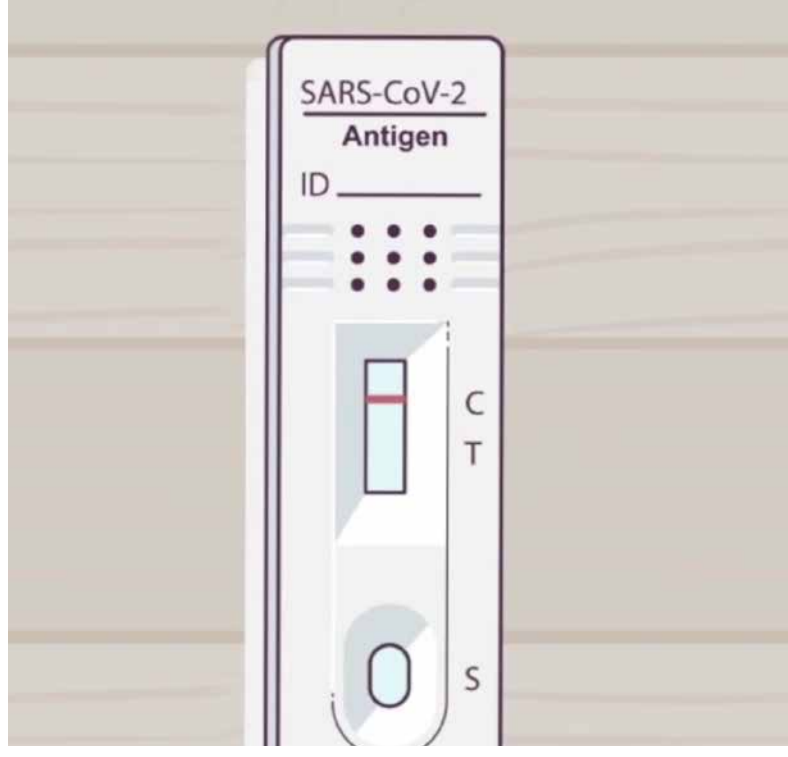

? INVÁLIDO

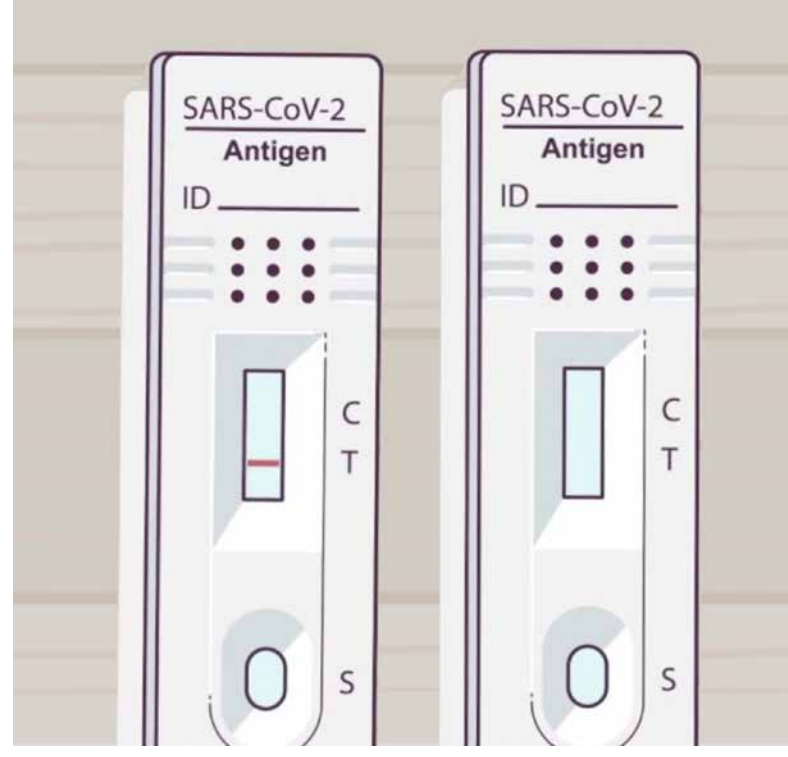

SI EL RESULTADO ES POSITIVO, COMIENZA INMEDIATAMENTE TU AUTOAISLAMIENTO Y CONTACTA CON LOS SERVICIOS SANITARIOS DE TU COMUNIDAD AUTÓNOMA.